

Sådan gør du, når du skal...

...Benytte vasketoiletet

Sæt dig godt tilbage på sædet, læn overkroppen lidt frem og brug fjernbetjening:

Vask bagtil:

- Tryk på symbolet  og bagerste område vaskes med tempereret vand. Anbefalet vasketid ca. 40 sek. Igangsæt herefter næste funktion.

Vask fortil:

- Tryk på symbolet  og kvindens feminine område vaskes med tempereret vand. Anbefalet vasketid 10 sek.

Tørring:

- Tryk på symbolet  og tørrefunktionen aktiveres.

Auto:

- Tryk på symbolet  eller  og dit personlige vaske/tørre program i gang sættes. (se manual for indstilling)

Stop:

- Tryk på symbolet  og den igangværende funktion afbrydes

... Rengøre vasketoiletet


Rengør som et alm. toiletsæde, må dog ikke oversprøjtes med vand... Husk at trække dyserne ud og aftør dem ved hver rengøring. Ca. hver 2. måned rengøres dyserne med eddike eller anden kalkopløsningsmiddel. Benyt evt. en gammel tandbørste. (se billede)



Sådan gør du, når du skal...

... indstille funktionerne

- Åben klappen på betjeningen
- Hvis ikonet ikke vises på displayet er funktionen slukket

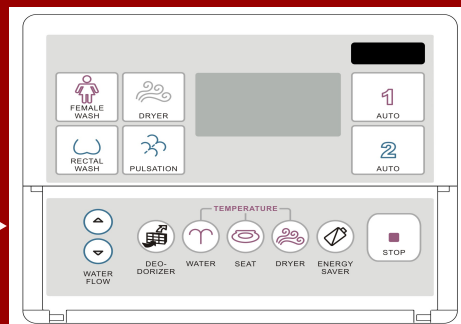

Sædetemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet.

! = Lav

! = Middel

! = Høj

Vandtemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet

! = 35°

! = 37,5°

! = 40°

Tørretemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet

! = Lav

! = Middel

! = Høj

Vandtryk.: Tryk på  "pil op" eller "pil ned" for at regulere vandtrykket

Alle ændringer gemmes automatisk