

# Sådan gør du når du skal...

## ...Anvende O/I Kontakt

- Sæt dig godt tilbage på sædet og læn kroppen lidt frem. Tryk én gang på kontakten og afvent at vaske- og tørre cyklus starter.
- Bidetsædet gennemfører nu det automatiske vaske-og tørreprogram, som er gemt bidetsædets hukommelse. (Se s. 11-12 i betjeningsmanualen for indstillinge)
- *Bemærk:* Hvis du trykker på kontakten én gang afbrydes igangværende vaskecyklus. Tryk på kontakten igen og vaskeprogram starter forfra

## ...Rengøre toilettet



- Rengør som et almindeligt toiletsæde, må dog ikke oversprøjtes med vand.. Husk at trække dyserne ud og aftør dem ved hver rengøring. Ca. hver 2 måned rengøres dyserne med mild kalkopløsningsmiddel evt. eddike . Benyt en gammel tandbørste. (Se billede)