

# CareBidets

**Betjenings- og monteringsvejledning  
Forhøjer / XL**



**CE**

## Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsregler.....	3
Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	3
I kassen medfølger .....	3
Tekniske specifikationer .....	4
Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse .....	5
Monteringsvejledning.....	6

**Forhandler:**

J. Honoré Care ApS  
Karetmagervej 19B - 7000 Fredericia  
Tlf.: 75 56 32 44  
[info@honorecare.dk](mailto:info@honorecare.dk)

**Producent:**

Santis Kft.  
Jégvirág utca 18  
4034 Debrecen  
Hungary



## Vigtige sikkerhedsregler



1. Træd ikke på produktet og må ikke anvendes til at stille sig op på	Advarsel – Fare for at falde ned
2. Må ikke bruges når den er defekt	Advarsel – Fare for at komme til skade
3. Må ikke bruges når den ikke er forsvarlig fastspændt til toilettet	Advarsel – Fare for at falde ned

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

CareBidets toiletforhøjer anvendes udelukkende til montering på toiletter sammen med et bidetsæde fra CareBidets. Forhøjeren har til formål at løfte siddepositionen således brugeren lettere kan komme til og fra toilettet. Produktet kan kombineres med armlæn fra

### Kontraindikationer for brug

- Brugeren vejer mere end 130 kg.

## I kassen medfølger

1 x forhøjer	
2 x bolte 2 x møtrik 2 x spændeskive 2 x tandskive 2 x gummimuffe, konisk	

## Tekniske specifikationer

	Forhøjer Standard	Forhøjer XL
Måltegning i mm.		
Forhøjer muligheder 4 og 6 cm. (40 mm / 60 mm)	40 mm. 60 mm.	40 mm. 60 mm.
HMI nr.	HMI: 64743(4 cm) HMI: 123367 (6 cm)	HMI: 82337 (4 cm) HMI: 123368(6 cm)
Maks brugervægt	130 kg.	130 kg.
Passer til følgende modeller fra CareBidets & Aspen Bidets	AB311, JHC311, JHC 511, JHC611	AB312, JHC312, JHC512, JHC612
Godkendelser/Erklæringer	CE / Medical Directive 93/42/EEC	CE / Medical Directive 93/42/EEC

## Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse


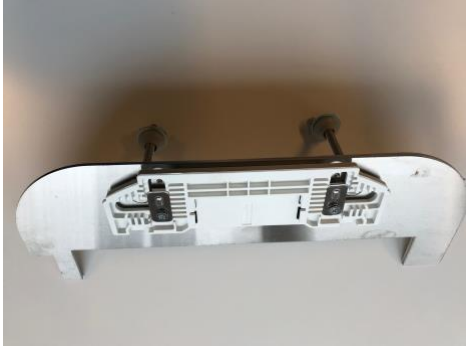


Når du skal rengøre produktet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe midler så som acetone, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, da dette kan beskadige plastikoverfladen. Tør delene med en hårdt opvreden klud eller svamp med lidt mildt rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud.

Produktet kan desinficeres og rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Produktet desinficeres ved at aftørre alle tilgængelige overflader med desinficerende middel.



Kontroller regelmæssigt om produktet er beskadiget og det generelt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende. Efterspænd produktet eller tilkald service tekniker såfremt dette skulle sidde løst.

## Monteringsvejledning

<p>1. Afmonter alm. toiletsæde fra toilettet</p>		
<p>2. Afmonter plastikmonteringspladen fra den rustfri stålplade, som følger med bidetsædet fra CareBidets</p> <p>N.B! husk rækkefølge, da pladen skal monteres igen.</p>		
<p>3. Erstat de eksisterende bolte med de medfølgende lange bolte og monter plastikmonteringspladen på den rustfri stålplade igen.</p>		
<p>4. Placér forhøjer på toilettet.</p>		

<p>5. Placér monteringspladen ovenpå forhøjeren. Spænd herefter forhøjeren fast til toilettet vha. de medfølgende fittings jf. rækkefølgen på billedet.</p>		
<p>6. Justér plastikpladen, så den er placeret så tæt på cisternen, som muligt. Pladen justeres ved at løsne skruerne.</p>		
<p>7. Montér CareBidets jf. betjenings- og installationsmanualen s. 22 pkt. 4 - 11</p>		