

## AUTO-PROGRAMMER – ANBEFALEDE INDSTILLINGER

Vi anbefaler følgende indstillinger af de to auto-programmer. Guide til indstilling af autoprogrammerne kan læses i brugervejledningen s. 11

Function	Level
Vandtemperatur (Rectal/Female)	Level 2 – Medium
Sæde temp.	Level 1 - Lav
Lufttørre temp.	Level 3 – Max
Vandtryk bagtil	Level 5 – Max
Vandtryk fortil	Level 5 - Max

Vi anbefaler følgende tidsindstillinger i nedenstående situationer. Det er selvfølgelig altid en individuel vurdering, som bør tages i dialog med borgeren.

### Case 1: Enlig kvinde i husstanden

Auto 1	Min.	Auto 2	Min.
Female	00:15	Female	00:05
Rectal	00:00	Rectal	00:30
Drying	06:00	Drying	06:00

### Case 2: Enlig mand i husstanden

Auto 1	Auto 2
Female	Female
Rectal	Rectal
Drying	Drying

### Case 3: Både mand og kvinde i husstanden

Auto 1	Auto 2
Female	Female
Rectal	Rectal
Drying	Drying

### HUSK:

Hvis fjernbetjeningen er tilkoblet en OneTouch eller 0/1-betjeningsenhed, så vil det være AUTO 1 indstillingerne, som anvendes.