


Kvikguide

J. Honoré Care
Tlf. 75 56 32 44
info@honorecare.dk

Sæt dig godt tilbage på sædet, læn overkroppen lidt frem og brug fjernbetjening:

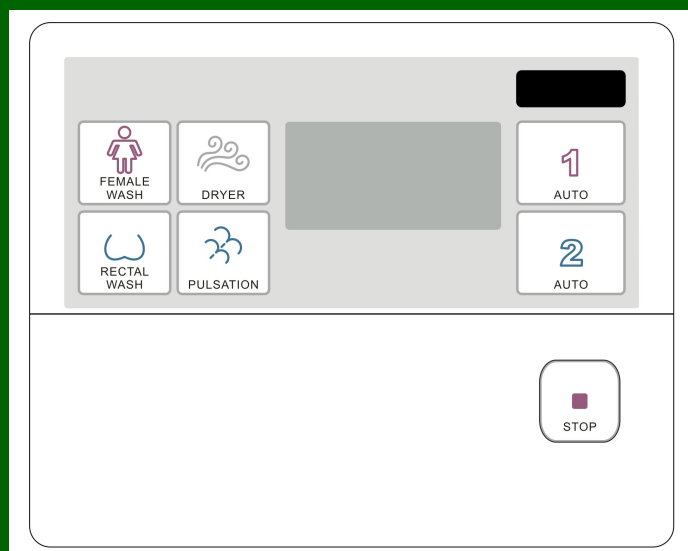

Video – Scan QR



Auto 1&2 indstilling



Rengøring & Tips

	Vask bagtil anbefalet vasketid ca. 40 – 50 sek.
	Vask fortil anbefalet vasketid ca. 10 sek.
	Tørring anbefalet tørretid ca. 4-6 min.
	Stop stopper alle igangværende funktion.
	Auto 1 & 2 udfører personligt vaske/tørreprogram
	Se nærmere i brugervejledning s. 14 eller scan QR-kode til Video


Rengøring....

Rengør som et alm. toiletsæde, må dog ikke oversprøjtes med vand... Husk at trække dyserne ud og aftør dem ved hver rengøring. Ca. hver 2. måned rengøres dyserne med eddike eller anden kalkopløsningsmiddel. Benyt evt. en gammel tandbørste. Læs mere i brugervejledningen s. 16-18 eller Scan QR-kode til Video

Sådan gør du, når du skal...

... indstille funktionerne

- Åben klappen på betjeningen
- Hvis ikonet ikke vises på displayet er funktionen slukket

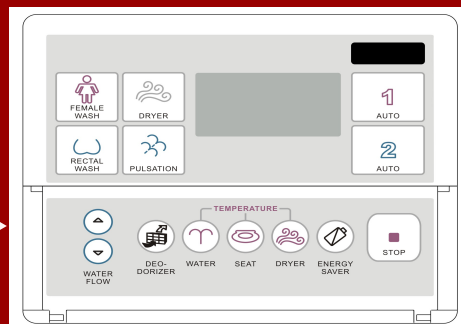

Sædetemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet.

! = Lav

! = Middel

! = Høj

Vandtemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet

! = 35°

! = 37,5°

! = 40°

Tørretemp.: Tryk på  indtil ønskede temp. vises på displayet

! = Lav

! = Middel

! = Høj

Vandtryk.: Tryk på  "pil op" eller "pil ned" for at regulere vandtrykket

Alle ændringer gemmes automatisk