

# CareBidets

## Betjenings- og installations manual Jasmin Care

600-series

JHC611/612




**Læs denne manual grundigt før brug**

# Indholdsfortegnelse

Mærkning & overensstemmelser .....	3
Vigtige sikkerhedsregler.....	5
Grundlæggende instruktioner.....	7
Sikkerhedsforanstaltninger .....	8-9
Udpakning af dit bidetsæde .....	10
Beskrivelse af fjernbetjeningen.....	11
Således benyttes bidetsædet .....	12
Multifunktionsknap.....	13
Tilslutning af ekstern O/I kontakt.....	13
Indstilling af automatisk vaske- og tørrecyklus (AUTO 1-2).....	14
Indstilling af ur .....	15
Natlys .....	15
Rengøring & vedligeholdelse .....	16-18
Før du ringer efter service.....	19
Bortskaffelse af elektronisk affald.....	20
Tekniske specifikationer.....	21
Monteringsvejledning.....	22-24

# Mærkning & overensstemmelser

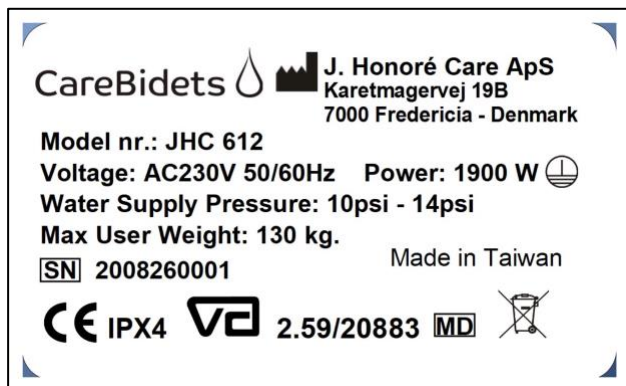

Mærkat på findes på bagsiden af produktet.  
Se side 4 for beskrivelse af ikoner

Model nr. \_\_\_\_\_

Serie nr. \_\_\_\_\_

Købsdato \_\_\_\_\_

Installatørs navn/telefon \_\_\_\_\_

Serienummeret findes på bidet "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne manual.

## Overensstemmelser

	Dette produkt overholder MDR 2017/745 vedrørende medicinske produkter. Lanceringsdatoen for produktet fremgår af CE-overensstemmelseserklæringen
	Produktet er testet og godkendt af Teknologisk institut ihf. EN1717 kat 5. (Beskyttelse mod forurening af drikkevandsinstallationer og generelle krav til enheder for at forhindre forurening via tilbageløb)
Max 130 kg	DS/EN 12182:2012 Hjælpe midler til personer med funktionsevnedssættelse - Generelle krav og prøvningsmetode
	Testet til at være i overensstemmelse med EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-84:2003 +A1:2008 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements Part 2-84: Particular requirements for toilets
	Testet til at være i overensstemmelse med EMC: EN 60601-1-2 Elektromedicinsk udstyr - Del 1-2: Generelle sikkerhedskrav og essentielle egenskaber - Parallel standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Bestemmelser og prøvninger Emission: CISPR 14-1:2015 + A1:2008 +A2:2011 EN 55014-1:2006 +A12009 +A2:2011 IEC 6100-3-2:2014, IEC 61000-3-3:2013 +A1:2019 Immunity: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC6100-4-8:2009, IEC 6100-4-11:2004 +A1:2017









## Levetid for produktet

Hvis produktet anvendes efter hensigten og i henhold til sikkerhedsbestemmelserne beskrevet i denne manual, er den forventede levetid for produktet ca. 5 år fra monteringsdato. Dog efter max 2 års hyldetid. Den effektive levetid på produktet kan variere alt efter brugens hyppighed, intensitet og daglig vedligeholdelse.

## Garanti

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande. Der kan kun rejses garantikrav igennem den forhandler, som produktet er købt hos.

## Symboler anvendt på mærkning på produkt og i denne bruger manual

Generelle symboler på emballagen og/eller produktmærkat	
	Læs brugervejledningen før brug
	Fabrikant
	Indikere et medicinsk udstyr der har brug for beskyttelse mod vand
	Medicinsk udstyr
	Serienummer Ex. Serie Nr.: 2008260001 År/måned for produktion – 2020/08
	Advarsel
	At identificere enhver terminal, der er beregnet til tilslutning til en ekstern leder til beskyttelse mod elektrisk stød i tilfælde af fejl, eller terminalen af en beskyttende jordelektrode (jordforbindelse)
	Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet angiver, at der kræves separat samling for batteri. Se mere på side 20



## Vigtige sikkerhedsregler

### Læs alle instruktionerne før ibrugtagning:

Ved brug af elektriske produkter, specielt med børn i nærheden, bør de basale sikkerhedsregler altid blive fulgt, hvilket inkluderer det følgende:

### Advarsler, forholdsregler og vigtige information

For at reducere risikoen for elektrisk stød bør følgende iagttages:

1. Bruges ikke under bad og må ikke oversprøjtes med vand.
2. Sid ikke på bidetsædet med fødder på vådt gulv
3. Såfremt en strømførende genstand falder i vand, f.eks. toiletkumme skal strømforsyningen straks afbrydes. Først når strømmen er afbrudt kan genstanden taget op af vandet. Send genstanden til reparation hos autoriseret værksted før brug.

For at reducere faren for brandsår, elektrisk stød, ild eller anden skade på personer eller genstande bør følgende desuden iagttages:

1. Brug kun produktet til det der er forskrevet i denne manual. Anvend ikke andet tilbehør, end det der anbefales af producenten.
2. Anvend aldrig produktet hvis et af følgende er opstået/sket:
  - a. Ødelagt ledning eller stik
  - b. Bidet ikke fungerer korrekt

Afbrud straks strømforsyning og kontakt os for service check og/eller reparation

3. Hold ledningen væk fra varme overflader
4. Bloker aldrig lufthullerne på produktet og stil det aldrig på en blød overflade. Hold produktet fri for hår og andre støvpartikler.
5. Indsæt ikke objekter i nogen åbninger eller slanger.
6. Brug ikke produktet udendørs, eller hvor spraydåser/oxygen flasker bliver anvendt og opbevaret.
7. Tilslut kun dette produkt til stikkontakt med jord.
8. Brug ikke toilet rens, acetone eller stærke rengøringsmidler.

9. Tændte cigaretter eller brændende materiale må ikke anvendes i nærheden af produktet
10. Foretag ikke uautoriserede ændringer på produktet.
11. Stik aldrig genstande eller hænder ind i åbninger i produktet herunder varmluftsblæseren, som ligeledes ikke må tildækkes.
12. Fjernbetjeningen skal fastgøres til væg eller skab med medfølgende beslag. Find en placering således at den kan betjenes fra toilettet.
13. Produktet må kun transporteres samt opbevares i tørre og frostfrie omgivelser forsvarlig pakket i original emballage.

### **Kontraindikationer for brug**

- Patienten/brugeren vejer mere end 130 kg
- Patienten/brugeren er ikke fysisk og psykisk i stand til at håndtere produktet sikkert

# Grundlæggende instruktioner



## **Tiltænkt anvendelse**

Produktet er udelukkende tiltænkt som en hjælp til toiletbesøget. Produktet må kun bruges af personer, som er fysisk og psykisk i stand til at håndtere det sikkert. Enhver anden brug af produktet er forbudt.

Produktet kan være nødvendigt for brugere med sygdomme eller handicap, som på grund af funktionsnedsættelser gør det umuligt for brugeren selv at rengøre området ved genitalierne på normalvis ifm. toiletbesøg

Dette er et elektrisk produkt der er forbundet til en vandkilde. Produktet er beregnet til anvendelse i et badeværelsesmiljø til brug i eget hjem eller institution og skal monteres på et passende gulvstående eller væghængt toilet. Se monteringsvejledning for nærmere beskrivelse.

Produktet opfylder kravene i regulativet (EU) 2017/745, retningslinjer for medicinsk udstyr. I tilfælde af alvorlig hændelse opstår i forbindelse med brugen af produktet rettes henvendelse til den lokale forhandler eller producenten og den nationale kompetente myndighed på rettidig måde.

## **For produkter der benytter sig af ledninger med et integreret jordstik:**

Dette produkt skal have en jordforbindelse. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at sørge for, at strømmen kan slippe ud via jordforbindelsen. Dette bidet er udstyret med en ledning med jordstik. Stikket må kun isættes i en stikkontakt der er korrekt installeret og jordet.

**FARE:** Forkert anvendelse af ledning og stik kan give en øget risiko for elektrisk stød.








Hvis reparation eller udskiftning af stikproppen er nødvendigt, skal bidetets spændingsforsyning afbrydes. Ledningen der er grøn med gule striber, er jordledningen.

**Kontroller med en autoriseret elinstallatør hvis den grundlæggende information ikke helt er forstået, eller hvis der er tvivl om produktet er korrekt jordet.**

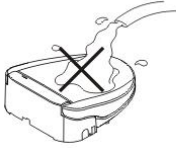
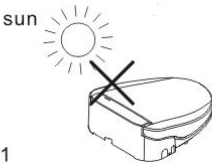
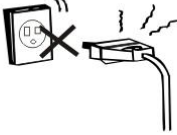

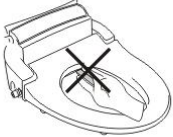

## **LÆS OG GEM DENNE INSTRUKTION**



## Sikkerhedsforanstaltninger

Hæld aldrig vand udover produktet (Fig.1)	 Fig. 1	
Læg aldrig ledning eller stik ned i toilettet Er en genstand faldet i toilettet skal strømmen til produktet afbrydes med det samme. (Fig.2)	 Fig. 2	
Sørg for, at børn ikke leger med produktet Sørg for, at personer med (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner kun bruger produktet under nøje opsyn, hvis de er i stand til at håndtere produktet på sikker vis.	 Fig. 4	
Benyt ikke låget som rygstøtte (Fig.5)	 Fig. 5	
Indstil sædetemperaturen til passende Niveau. Personer med følsom hud bør indstille temp. til laveste niveau (Fig. 6)	 Fig. 6	
Tildæk aldrig et opvarmet sæde... (Fig. 7) Låget må gerne være lukket...	 Fig. 7	
Såfrem toiletsædet ikke skal benyttes i længere periode, skal strømmen slås fra.	 Fig. 8	




<p>Tøm bidet for vand såfrem det ikke skal benyttes i en længere periode (Fig. 9) Se beskrivelse heraf på side 15</p>	 Fig. 9	
<p>Bidet må ikke udsættes for frost eller direkte sollys da dette kan beskadige plast overfladen. (Fig.11)</p>	 Fig. 11	
<p>Anvend aldrig en beskadiget ledning eller tilslut aldrig systemet til en løs eller defekt kontakt. ved tvivl kontakt forhandleren eller en autoriserede EI-installatør. (Fig.12)</p>	 Fig. 12	
<p>Udsæt ikke vandtilslutningen for voldsom behandling, da dette kan medføre lækage (Fig.13)</p>	 Fig. 13	
<p>Udsæt ikke vaskearmene for voldsom behandling da dette kan ødelægge disse. (Fig. 14)</p>	 Fig. 14	
<p>Brug ikke toilettrens, acetone eller stærke rengøringsmidler.</p>	 Fig. 15	
<p>Tændte cigaretter eller brændende materiale må ikke anvendes i nærheden af produktet</p>	<p><b>Risiko for personskade</b></p>	
<p>Foretag ikke uautoriserede ændringer på produktet.</p>	<p><b>Risiko for personskade</b></p>	
<p>Stik aldrig genstande eller hænder ind i åbninger i produktet herunder varmluftsblæseren, som ligeledes ikke må tildækkes.</p>	<p><b>Fare for elektrisk stød</b></p>	
<p>Fjernbetjeningen skal fastgøres til væg eller skab med medfølgende beslag. Find en placering således at den kan betjenes fra toilettet.</p>	<p><b>Anvisning</b></p>	
<p>Produktet må kun transporteres samt opbevares i tørre og frostfrie omgivelser og forsvarlig pakket i original emballage.</p>	<p><b>Transport/opbevaring – Risiko for beskadigelse af produktet</b></p>	

## Udpakning af dit bidetsæde





- Elektronisk bidetsæde (ikke afbilledet)
- Fjernbetjening
- Vægmonteringsbeslag til fjernbetjening
- Flexslange til vandtilslutning
- T-stykke
- Monteringskonsol med bolte, spændeskiver, vinge møtrikker samt *click-on* beslag.
- Batterier 2 stk. (AA)

Følgende værktøj benyttes ved montering

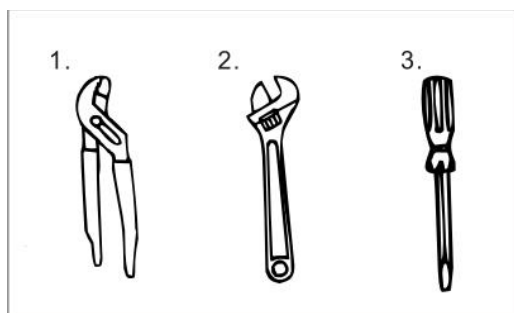

# Beskrivelse af fjernbetjeningen

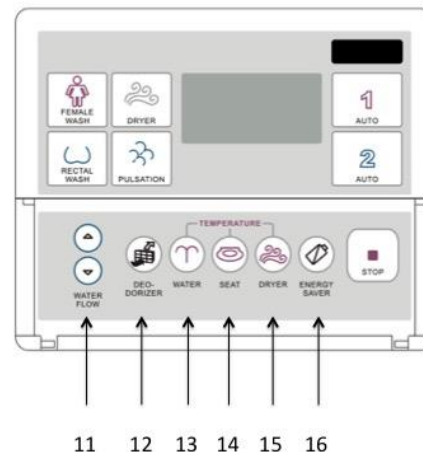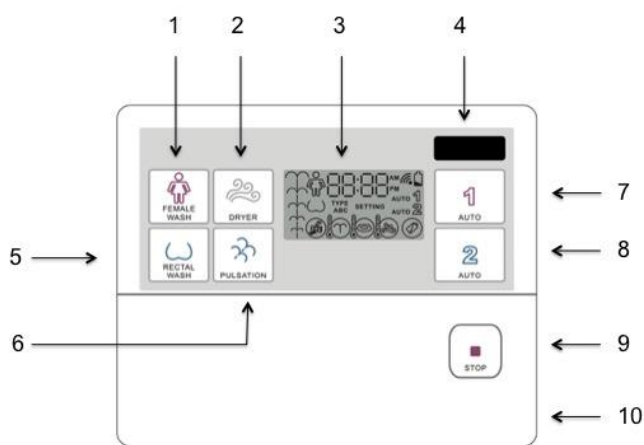

1. Skyl fortil
2. Luft tørring
3. Display vindue
4. IR sender
5. Skyl bagtil
6. Pulserende vandstråle

7. Auto program 1
8. Auto program 2
9. Stop
10. Børnesikring

- Aktiverer dysen med femininskyl
- Aktiverer tørre funktion
- Viser funktionsstatus
- Infrarød sender
- Aktiverer dysen med rektal skyl
- Aktiverer pulserende vandstråle (kan først aktiveres når skyl er aktiv)
- Aktiverer personlig vaskecyklus
- Aktiverer personlig vaskecyklus
- Afslutter igangværende funktion
- Børnesikre indstillingsmulighederne

## Indstillinger (gemt bag klappen)


11. Vaskestyrke
12. Deodorizer
13. Vand temperatur
14. Sædetemperatur
15. Tørretemperatur
16. ECO-standby mode








- Regulerer vaskestyrken i 5 trin
- Luftrenser aktiveres
- Regulerer vandtemperatur i 4 trin ved gentagende tryk
- Regulerer sædetemperatur i 4 trin ved gentagende tryk
- Regulerer tørretemperatur i 4 trin ved gentagende tryk under aktivering
- Sædevarme aktiveres kun under brug

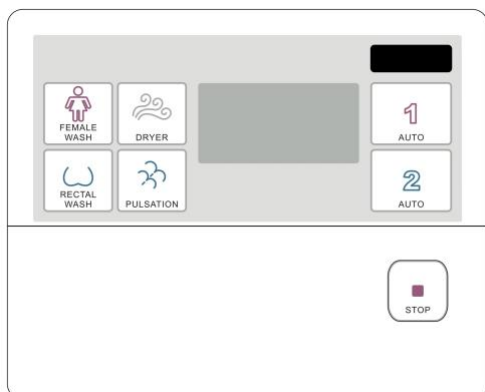De valgte indstillinger kan aflæses i displayvinduet og er automatisk gemt i bidetsædets hukommelse. I tilfælde af strømafbrydelse eller batteriskift er dine indstillinger gemt.

## Således benyttes bidetsædet

Sæt dig godt tilbage på sædet og læn dig lidt frem i overkroppen før du aktiverer bidetsædets funktioner som beskrevet nedenfor. Bemærk, at bidetfunktionerne først kan aktiveres, når du sidder på sædet og fjernbetjeningen virker derfor kun, hvis du sidder på sædet eller trykker sædet ned i højre side bagerst. **Tryk på den ønskede knap én gang og vent på funktionen aktiveres. Skal ikke holdes inde.**



 FEMALE WASH	Aktiverer feminin vask. Anbefalet vasketid: 10 sekunder
 RECTAL WASH	Aktiverer rektal vask. Anbefalet vasketid: 30 – 50 sekunder
 DRYER	Aktiverer tørrefunktion. Anbefalet tørretid 3 – 5 min.
 PULSATION	Aktiverer pulserende vask for feminin eller rektal vaskeprogram. Aktivér først rectal wash eller female wash
 STOP	Standser/stopper igangværende funktion
 AUTO	Aktiverer automatisk vaske- og tørrecyklus. Denne vaskecyklus kan indstilles efter dine ønsker. Se side 14
 AUTO	Aktiverer automatisk vaske- og tørrecyklus. Denne kan indstilles efter dine ønsker. Se side 14

Når du er færdig forlader du blot sædet, som automatisk går i dvalestatus indtil næste gang det skal anvendes.

# Multifunktionsknap på bidetsædet

I bidetsædets venstre side (når man sidder på produktet) er placeret en multifunktionsknap.



Med denne kan følgende funktioner udføres:

## Når du IKKE sidder på sædet

1. Et tryk - dyserne renses automatisk
2. Tryk og hold trykket i ca. 10 sek. og bidetsædet slukkes – Tryk igen for at tænde.


## Når du sidder på sædet

1. Et tryk – Auto 1 program aktiveres - Tryk igen for at stoppe igangsatte program
2. To tryk – Auto 2 program aktiveres - Tryk igen for at stoppe igangsatte program

Se hvordan Auto 1 og 2 indstilles på side 11.

# Tilslutning af ekstern O/1 kontakt

Jasmin Care kan betjenes vha. en ekstern O/1 kontakt der tilsluttes bidetsædets fjernbetjening via et mini-jackstik (mono).

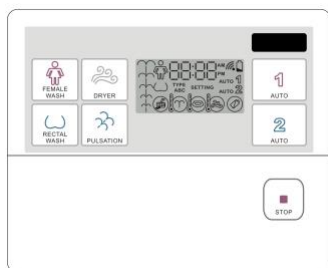

tilslutning af mini jackstik (mono)





















Med et tryk på O/I kontakten aktiveres det vaske- og tørreprogram som er indstillet og lagret under <sup>1</sup>AUTO. Det betyder at bidetsædet udfører den vaske- og tørrecyklus, som opfylder dine personlige ønsker og som er lagret i bidetsædets hukommelse. (se side 14 for indstilling af Auto1/2)

J. Honoré Care forhandler O/I kontakter der kan placeres på væg, gulv og armlæn. Herudover er der integreret O/I kontakt i vores armlæn (Armlæn med One Touch) samt i vores toiletsædeløfter.

# Indstilling af automatisk vaske- og tørrecyklus

Bidetsædet er udstyret med en unik autofunktion, der starter en vaske- og tørrecyklus blot ved at trykke på én knap. Der er mulighed for at lagre to personlige vaske- og tørrecykluser i bidetsædets hukommelse.


Sådan foretager du indstilling og lagring af autofunktionerne

- \* Tryk på  eller  og hold trykket i ca. 5 sekunder. I displayvinduet blinker nu symbolet for feminin vask samt vasketryks symbolet. Du kan nu indstille det vasketryk som du ønsker på det feminine skyl ved, at trykke på  til det ønske vandtryk vises i displayet. 
- \* Tryk herefter på  knappen og symbolet for feminin vask samt skylletid blinker. Du kan nu ændre den ønskede skylletid fra 0 til 30 sekunder ved, at trykke på  til den ønskede skylletid vises i displayet. 
- \* Tryk herefter på  knappen, og symbolet for rektal vask samt vasketryks symbolet blinker. Du kan nu indstille det vasketryk, som du ønsker på det rektale skyl ved, at trykke på  til det ønske vandtryk vises i displayet. 
- \* Tryk igen på  knappen, og symbolet for rektal vask samt skylletid blinker. Du kan nu ændre den ønskede skylletid fra 0 til 01:30 minutter ved, at trykke på  til den ønskede skylletid vises i displayet. 
- \* Tryk på  knappen, og symbolet for tørre temperaturen blinker. Du kan nu indstille temperaturen på lufttørrer ved, at trykke på  til den ønskede temperatur vises i displayet 
- \* Tryk igen på  knappen og tørretiden blinker nu i displayet. Du kan ændre den ønskede tørretid fra 0 til 6 minutter ved at trykke på  til den ønskede tørretid vises i displayet. 
- \* Tryk på  og bidetsædet afgiver et kort bip. Indstillingerne er nu lagret og autofunktionen er klar til brug.

## Indstilling af uret (på fjernbetjeningen)

Slå klappen ned på fjernbetjeningen, så alle indstillinger er synlige. Hold STOP knappen inde indtil der står "SETTING" i displayet og tiden blinker, "pil op" indstiller timerne og "pil ned" indstiller minutterne. Tryk på stop når du har indstillet tiden korrekt og indstillingen er gemt.

## Sluk for blå lys i kummen

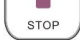Det blå natlys (LED) i kummen tændes og slukkes ved at trykke én gang på  knappen, når sædet ikke er aktiveret. Det vil sige når der ikke sidder nogen på sædet.

0/1 kontakt tilsluttet: Hvis du betjener bidetsædet med en 0/1 kontakt skal denne trykkes på to gange for at slukke for lyset. Bemærk at sædet ikke skal være aktiveret.

## Vær opmærksom på følgende

Dyserne skylles/renses automatisk efter med rent vand, når du har rejst dig fra sædet.

Såfremt sædet ikke bliver brugt over en længere periode, anbefaler vi, at du slukker for strømmen til sædet og lukker for vandforsyningen.

## Rengøring

Når du skal rengøre dit bidetsæde, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skræppe rengøringsmidler så som acetone, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, de vil ødelægge plastikoverfladen.

### - Rengøring af sæde, låg og hoveddelen




Tør delene med en **hårdt** opvredet klud med lidt mildt rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud. Benyt ikke mikrofiberklude, da de kan beskadige overfladen.

Træk forsigtigt vaskearmene ud til stop:

**Ugentligt eller efter behov:** Vask dyserne og dysearme af, brug mildt rengøringsmiddel.

### Hver 2. eller 3. måned (afhænger af vandhårdhed)

Hæld eddike eller mild citronopløsning over dyserne og dysearme, Lad dette sidde ca. 2 minutter og brug da en gammel tandbørste for at rengøre og løsne kalk. Tør evt. efter med en opvreden klud.

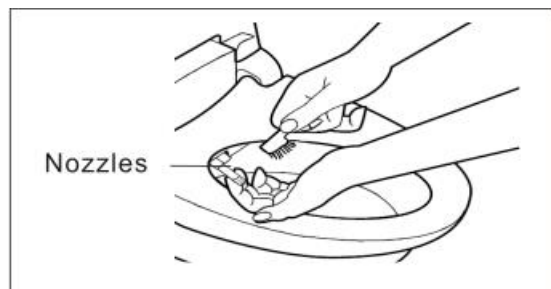






**Ved grundig rengøring kan låget tages helt af og sædet kan løsnes:  
(Læs først hele vejledningen grundigt)**


Låget på sædet kan tages helt af ved at slå sædet op og derefter trække ud i den ene side til det løsnes. Derefter kan den anden side let frigøres.

1. Mens sædet er oppe, Tryk knap på låsering ind, skub derefter låseringen i venstre side op. Du kan nu forsigtigt frigøre sædet fra hoveddelen og derved komme til, at gøre rent under sædet.

**Tryk og skub låse ring opad**

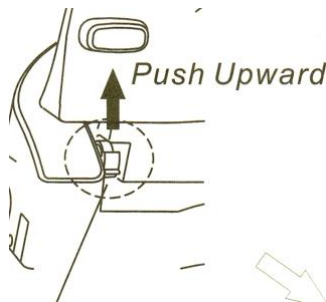

**Løft sædet opad**

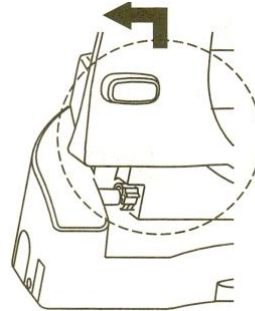

Pas på ikke at trække for meget i ledningen i højre side når du løfter sædet. Såfremt ledningen beskadiges, skal sædet tages fra strøm og sendes til reparation.

**HUSK OGSÅ AT SKUBBE LÅSE RINGEN HELT NED IGEN TIL – klik - SÅLEDES, AT SÆDET ER RIGTIGT MONTERET IGEN EFTER RENGØRING.**



## **VIGTIG INFORMATION**

**Når sædet skal sættes på igen, er det yderst vigtigt, at dette gøres forsigtigt, nede fra og op i hullet - uden brug af kræfter. Hvis ikke sædet efterfølgende kan trykkes ned i højre side, er det ikke sat korrekt på og sædet virker ikke.**

# Vedligeholdelse



*Tag først strømmen fra sædet*

## Rensning af vandfilter

1. Sluk for vandtilførslen og strøm

2. Fjern gummidækslet og bruge en mønt for at fjerne filteret. Drej mod uret

3. Rengør filteret forsigtig med lidt vand og en tandbørste. Genindsæt filteret og kontroller, at det sidder korrekt.

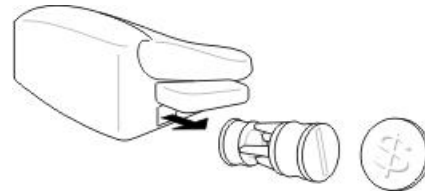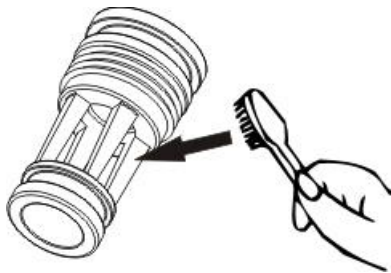

4. Tænd for vandtilførsel og strøm igen.

Rensning af vandfilter udføres efter behov.

## Før du ringer efter service

Problem	Årsag	Løsning
Vandtrykket er lavt	1. Indstilling på fjernbetjening er sat til lavt vasketryk	1. Foretag indstilling på fjernbetjening som beskrevet på side 11.
Dysearmen kommer ikke ud	1. Der sidder snavs på dysearm. 2. Du sidder for langt fremme på sædet 3. Batterier for gamle 4. Produkt skal genstartes	1. Rengør forsigtigt dyse arm og hoved 2. Sæt sig godt tilbage på sædet til sædesensor er aktiveret (lugtudsugnings-system starter) 3. Udskift batterier i fjernbetjeningen. 4. Tag strømstikket ud af kontakten, vent 5-10 sek. og sæt stikket ind igen.
Dysen kommer kun halvt ud	1. Dyse arm er snavset eller kalket til.	1. Rengør forsigtigt dyse arm og hoved 2. Afkalk dysearme og hoved 3. Bestil service
Vaskeprogram er aktiveret og vand skyller ned i toiletkummen, men dysearmen kommer ikke umiddelbart ud	1. Afhængig af temperatur på indløbsvand vil produktet skylle vand igennem systemet indtil den er klar til at levere den ønskede vandtemperatur – hvorefter dysearmen vil køre ud.	1. Vent op til 20 sek. til dysearmen kommer frem. Tiden afhænger af forholdet mellem temperatur på indløbsvand og indstillet vaske-temperatur
Dyserne holder pludselig op med at skylle	1. Du sætter for langt fremme på sædet eller har rykket dig således at sædesensor er blevet deaktiveret	1. Genstart vaskefunktionen
Sædetemperaturen er lav	1. Har ikke nået at varme op endnu. Hav tålmodighed 2. Forkert indstilling på fjernbetjening 3. Eco-standby aktiveret	1. Kontroller indstillingen på fjernbetjeningen. 2. Indstil ønsket temperatur 3. Tryk på "energy saver" således at batteri ikon forsvinder fra fjernbetjeningen
Vandtemperaturen er for lav	1. Forkert indstilling på fjernbetjening	1. Se temperatur indstilling på s. 11
Fjernbetjeningen virker ikke	1. Batteri niveau er lavt 2. Fjernbetjeningen er for langt fra sæde. 3. Produkt skal genstartes	1. Skift batteri. 2. Placer fjernbetjening i nærheden af sædet 3. Tag strømstikket ud af kontakten, vent 5-10 sek og sæt stikket ind igen.

Hvis der stadig er problemer med at få sædet til at virke, efter at have fulgt ovenstående vejledninger er De velkommen til at kontakte os på tlf. 75 56 32 44 eller mail: [info@honorecare.dk](mailto:info@honorecare.dk)

**Bemærk:** Funktionerne virker kun når sædet er aktiveret dvs. trykket ned i højre side, når du står foran sædet og venstre side når du sidder på sædet.

# Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med oven stående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.


Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bort skaffeaffald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

# Tekniske specifikationer

Model nr.		JHC-611	JHC-612
Spænding		230 V	
Netfrekvens		50 – 60 Hz	
Max strømforbrug		1900W	
Ledningens længde		1,5 meter	
Kapslingsklasse		IPX4	
Vaske-funktioner	Gennemstrømsvandvarmer	Ubegrænset varmt vand	
	Varmvandstank	30 ml.	
	Vandtemperatur	Justerbar i fire trin: Værelsestemp./ 35° / 37,5° / 40°	
	Sikkerhedsanordning	Termisk afbryder, flyderudstyr med stop-ventil og vakuum afbryder	
	Vandgennemstrømning i dyser	Justerbar i 4 trin: Ca. 1,2 L/min	
Opvarmet sæde	Sædevarme	Justerbar i fire trin: Rumtemperatur/35°/37,5°/40°	
	Effektforbrug	55W	
	Sikkerhedsanordning	Indbygget termisk afbryder	
Vandforsyningstryk		0,7 – 10 bar (10 psi -140 psi)	
Sikkerhedsanordning		Jordfejldetektor, automatisk afbryder, sædeafbryder	
Tørrefunktion	Tørretemperatur	Justerbar i tre trin: 35° - 70°	
	Effektforbrug	400W	
Net vægt		4,1 kg	
Max brugervægt		130 kg.	130 kg.
Godkendelser		CE, VA, EN1717 kat 5.	

## Mål på model Jasmin Care

Model nr.	JHC-611	JHC-612
A	430 mm.	460 mm.
B	460 mm.	490 mm.
C	410 mm.	
D	140-170 mm.	
Sædeåbning L x B	260x200 mm.	290x200 mm.

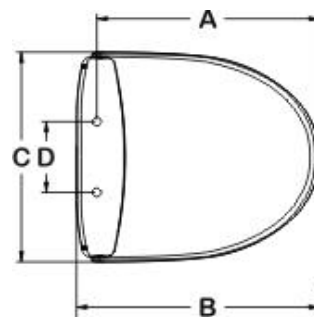


# Monteringsvejledning

CareBidets skal placeres så det ikke oversprøjtes med vand. Produktet er IPX4 klassificeret og skal installeres iht. gældende bygningsreglement på området.

1) Afmonter det eksisterende toiletsæde

2) Monteringskonsollen fastgøres til kummen med de forud monterede bolte, spændeskiver samt vinge møtrikker.

Kontroller, at konsollen er centreret samt møtrikker hårdt spændt.

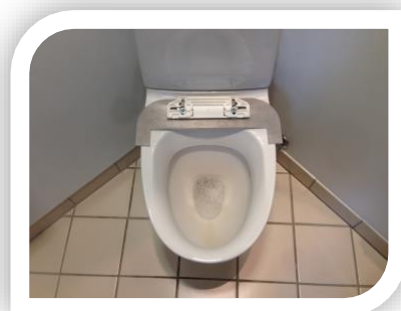

3) Juster *click on*-skinnen vha. de 2 forud monterede stjerne skruer således, at afstand fra bagkant skinne til forkant cisterne udgør ca. 2 mm. Herefter spændes de 2 stjerne skruer.




4) Monter bidetsædet ved forsigtigt, at glide sædet indover *click on*- skinnen indtil sædet er helt tilbage på skinnen og der høres et lille **Klik**.



5) Kontroller at sæde sidder ordentlig fast samt, at sædeudløserknappen nu er i neutral position. Udløserknappen skal være helt ud således, at denne er plan med resten af kabinettet.



6) Sluk for vandtilførsel ved stophanen.

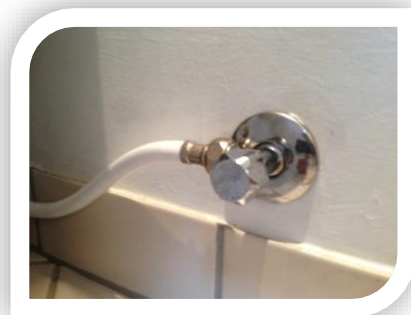

7) Afmonter vandtilførslen under toiletcisternen. Monter det medfølgende T-Stykke på toiletcisternens vandtilførsel. Monter vandtilførselsslangen fra stophanen til T-stykkets bundtilkobling. Monter den medfølgende fødeslange på T-stykket.

Spænd alle monteringer efter.



#### TILSLUT ALTID **VAND FØR STRØM**

8) Monter fødeslangen til bidetsædets vandindtag på venstre side. Åben herefter for vandforsyning ved stophanen og kontroller, at installationen er tæt.



9) Opsæt fjernbetjeningsenheden på passende sted vha. det nedfølgende beslag.



10) Tilslut strømstikket til en stikkontakt m/jord og tænd for strømmen.



11) Bidetsædet starter op og foretager en efterskylning af dyserne. Foretag de ønskede indstillinger på fjernbetjeningen og bidetsædet er nu klar til brug.



**BEMÆRK:** Hvis bidetsædet blinker og ikke starter – så er strømmen tilsluttet før vandet. Ta' stikket ud og vent, derefter tilslut strømmen igen.

**BEMÆRK:** Bidetsædet virker kun, når man aktiverer sædet ved enten at sidde på sædet eller trykker det ned i højre side (når du står foran sædet).