

CareBidets

Betjenings -og monteringsvejledning
Armlæn
Model TGH



CE



Læs denne manual
grundigt inden brug

Vigtige sikkerhedsregler.....	3
Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	3
I kassen medfølger	3
Tekniske specifikationer	4
Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse	5
Betjening af OneTouch-knap (Armlæn OT).....	5
<i>Sådan virker det</i>	5
Monteringsvejledning.....	6

Forhandler:

J. Honoré Care ApS
Karetmagervej 19B - 7000 Fredericia
Tlf.: 75 56 32 44
info@honorecare.dk

Producent:

Santis Kft.
Jégvirág utca 18
4034 Debrecen
Hungary



Vigtige sikkerhedsregler



Træd ikke på produktet	Advarsel – Fare for at falde ned
Må ikke anvendes til at stille sig op på	Advarsel – Fare for at falde ned
Må ikke bruges hvis ikke produktet er forsvarligt fastspændt.	Advarsel – Fare for at falde ned
Må ikke bruges hvis produktet er defekt	Advarsel – Fare for at komme til skade.
Tændte cigaretter eller brændende materialer må ikke anvendes i nærheden af produktet	Advarsel – Fare for at komme til skade.
Opbevaring & Transport	Produktet bør altid opbevares og transporteres under tørre omgivelser

Bestemmelsesmæssig anvendelse

CareBidets fleksible armlæn anvendes udelukkende til montering på toiletter sammen med et bidetsæde fra CareBidets. Produktet har til formål at give støtte således brugeren lettere kan komme til og fra toilettet. De fleksible armlæn kan også kombineres med en forhøjer med varenr. 600,601,650,651 fra CareBidets. Produktet opfylder kravene i regulativet (EU) 2017/745, retningslinjer for medicinsk udstyr. I tilfælde af alvorlig hændelse opstår i forbindelse med brugen af produktet rettes henvendelse til den lokale forhandler eller producenten og den nationale kompetente myndighed på rettidig måde.

Kontraindikationer for brug

- Patienten/brugeren vejer mere end 150 kg
- Patienten/brugeren er ikke fysisk og psykisk i stand til at håndtere produktet sikkert

Garanti

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande. Der kan kun rejses garantikrav igennem den forhandler, som produktet er købt hos.

I kassen medfølger

2 x Armstøtter
1 x Grundmodul
2 x Hvide møtrikskjuler
2 x Lange bolte inkl. fittings (hvis bestilt sammen med forhøjer)

Tekniske specifikationer

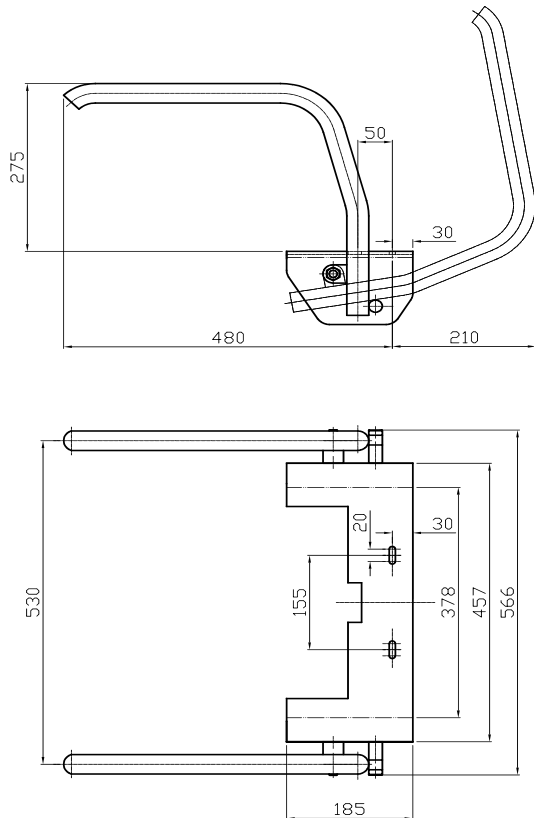


Figure 1: Teknisk tegning (mm), CareBidets - Fleksible armlæn

Beskrivelse	Data
Maks bredde	566 mm
Bredde mellem armstøtter	485 mm
Højde – fra siddeposition til øverst armlæn	255 mm
Maks brugervægt	150 kg.
Passer til følgende modeller fra CareBidets & Aspen Bidets	Alle
Modeller	Armlæn standard. - Varenr.: 500 - HMI nr. 63480 Armlæn med indbygget OneTouch - Varenr.:500OT - HMI nr.: 82316
Godkendelse/erklæringer	CE / MDR 2017/745

Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse

Når du skal rengøre produktet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe midler så som acetone, klor, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, da dette kan beskadige produktet. Tør delene med en hårdt opvreden klud eller svamp med lidt mildt rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud.

Produktet kan desinficeres og rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Produktet desinficeres ved at aftørre alle tilgængelige overflader med desinficerende middel.



Kontroller regelmæssigt om produktet er beskadiget og det generelt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende. Efterspænd produktet eller tilkald servicetekniker såfremt dette skulle sidde løst.

Betjening af OneTouch-knap (Armlæn OT)

Dette afsnit er kun relevant for Armlæn OT (varenr: 5000T).

Den indbyggede knap for enden af armlænet kan benyttes til at betjene CareBidets model Jasmin Care/Lotus Care på en mere simpel måde. Med blot ét tryk på knappen og bidetsædet udfører automatisk det personligt indstillede vaske- og tørreprogram indstillet under Auto 1 i fjernbetjeningen for CareBidets. Se hvordan Auto 1 indstilles i bruger- og monteringsvejledning for CareBidets.

Sådan virker det

- Ledning i bunden af armlænet trækkes ud og tilsluttes fjernbetjenings AUX indgang.

Når du sidder på dit bidetsæde

- Et tryk = Auto 1 program starter – Tryk igen for at afslutte programmet før tid.

Når du ikke sidder på bidetsædet


- To tryk = Natlys (blåt LED-lys) tændes / slukkes



Figure 2: Armlæn med OneTouch-betjening af CareBidets

Monteringsvejledning


- 1) **Afmontér plasticmonteringspladen fra stålpladen. Gem stålpladen til evt. senere anvendelse**

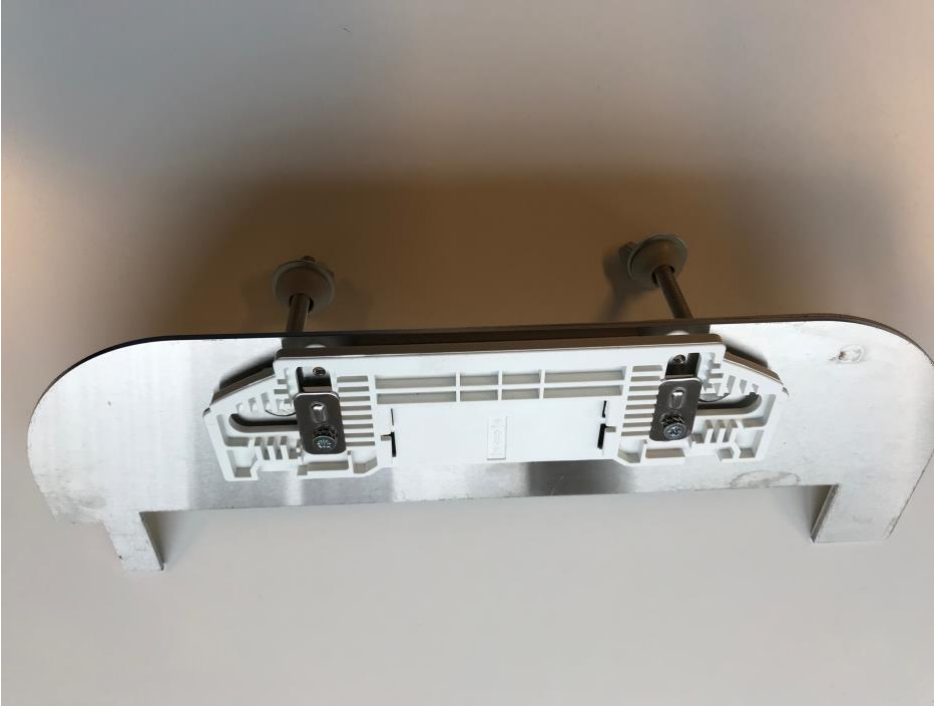


- 2) **Bolte, skruer og plasticplade skal herefter påmonteres armlænsmodulet.**



3) Bolte placeres i de forberedte huller i armlænsmodulet

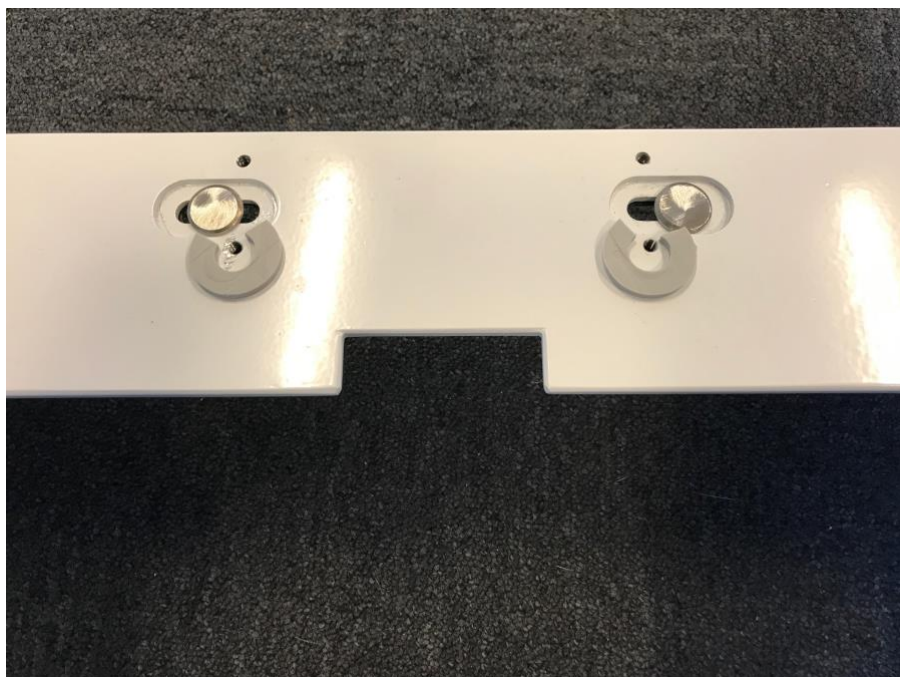

4) Herefter skrues plasticmonteringspladen fast til modulet.

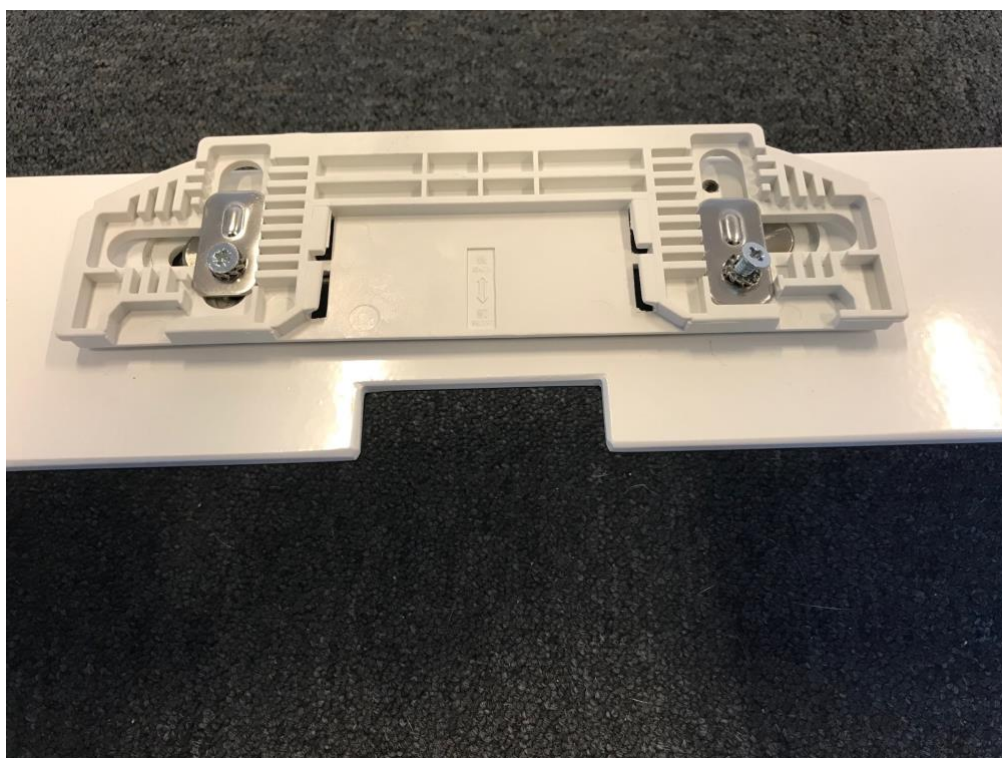

5) Afmonter møtrik og fjederskive.



6) Spændeskive skal blive inderst



7) Monter armlæn på modulet med møtrik og fjederskive



8) Hvid møtrikhætte påsættes



5) Herefter placeres modulet på toiletkummen og fastgøres med medfølgende fittings.

Plasticpladen reguleres og skrues fast i den ønskede position.

CareBidets er nu klar til at blive monteret.

