

CareBidets

**Betjenings- og monteringsvejledning
Forhøjer**

SE4S, SE4L, SE6S, SE6



CE



Læs denne manual
grundigt inden brug

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsregler.....	3
Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	3
Garanti.....	3
I kassen medfølger	4
Tekniske specifikationer	5
Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse	6
Monteringsvejledning.....	7

Forhandler:

J. Honoré Care ApS
Karetmagervej 19B - 7000 Fredericia
Tlf.: 75 56 32 44
info@honorecare.dk

Producent:

Santis Kft.
Jégvirág utca 18
4034 Debrecen
Hungary



Vigtige sikkerhedsregler



1. Træd ikke på produktet og må ikke anvendes til at stille sig op på	Advarsel – Fare for at falde ned
2. Må ikke bruges når den er defekt	Advarsel – Fare for at komme til skade
3. Må ikke bruges når den ikke er forsvarlig fastspændt til toilettet	Advarsel – Fare for at falde ned
4. Tændte cigaretter eller brændende materialer må ikke anvendes i nærheden af produktet	Risiko for personskade
5. Opbevaring & Transport	Produktet bør altid opbevares og transporteres under tørre omgivelser

Bestemmelsesmæssig anvendelse

CareBidets toiletforhøjer anvendes udelukkende til montering på toiletter sammen med et bidetsæde fra CareBidets. Forhøjeren har til formål at løfte siddepositionen således brugeren lettere kan komme til og fra toilettet. Produktet kan kun kombineres med armlæn fra CareBidets med varenr. 500/500OT. Produktet opfylder kravene i regulativet (EU) 2017/745, retningslinjer for medicinsk udstyr. I tilfælde af alvorlig hændelse opstår i forbindelse med brugen af produktet rettes henvendelse til den lokale forhandler eller producenten og den nationale kompetente myndighed på rettidig måde.

Kontraindikationer for brug

- Brugeren vejer mere end 130 kg.

Garanti

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande. Der kan kun rejses garantikrav igennem den forhandler, som produktet er købt hos

I kassen medfølger

- 1 x forhøjer
- 2 x bolte
- 2 x møtrik
- 2 x spændeskive
- 2 x tandskive
- 2 x gummimuffe, konisk



Tekniske specifikationer

	Forhøjer Standard	Forhøjer XL
Måltegning i mm.		
Forhøjer muligheder 4 og 6 cm. (40 mm / 60 mm)	<p>40 mm.</p> <p>60 mm.</p>	<p>40 mm.</p> <p>60 mm.</p>
HMI nr.	HMI: 64743(4 cm) HMI: 123367 (6 cm)	HMI: 82337 (4 cm) HMI: 123368(6 cm)
Varenr.	600, 601	650, 651
Maks brugervægt	130 kg.	130 kg.
Passer til følgende modeller fra CareBidets & Aspen Bidets	AB311, JHC311, JHC 511, JHC611	AB312, JHC312, JHC512, JHC612
Godkendelser/Erklæringer	CE / MDR 2017/745	CE / MDR 2017/745

Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse


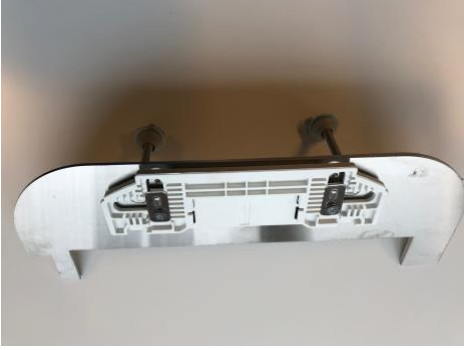


Når du skal rengøre produktet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe midler så som acetone, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, da dette kan beskadige plastikoverfladen. Tør delene med en hårdt opvreden klud eller svamp med lidt mildt rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud.

Produktet kan desinficeres og rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Produktet desinficeres ved at aftørre alle tilgængelige overflader med desinficerende middel.



Kontroller regelmæssigt om produktet er beskadiget og det generelt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende. Efterspænd produktet eller tilkald servicetekniker såfremt dette skulle sidde løst.

Monteringsvejledning

<p>1. Afmonter alm. toiletsæde fra toilettet</p>		
<p>2. Afmonter plastikmonteringspladen fra den rustfri stålplade, som følger med bidetsædet fra CareBidets</p> <p>N.B! husk rækkefølge, da pladen skal monteres igen.</p>		
<p>3. Erstat de eksisterende bolte med de medfølgende lange bolte og monter plastikmonteringspladen på den rustfri stålplade igen.</p>		
<p>4. Placér forhøjer på toilettet.</p>		

<p>5. Placer monteringspladen ovenpå forhøjeren. Spænd herefter forhøjeren fast til toilettet vha. de medfølgende fittings jf. rækkefølgen på billedet.</p>		
<p>6. Justér plastikpladen, så den er placeret så tæt på cisternen, som muligt. Pladen justeres ved at løsne skrueerne.</p>		
<p>7. Montér CareBidets jf. betjenings- og installationsmanualen s. 22 pkt. 4 - 11</p>		