

Bano drejbart toilet

Pleje og vedligeholdelses dokumentation



BANO Danmark AS

Møllehaven 8
DK-4040 Jyllinge

Tlf.: +45 26 24 55 14
post@bano.dk

5920-BVT Bano drejbart toilet

Højdejusterbart cisterne



Produktinformation

Bano cisterne med elektrisk motor er en cisterne med mulighed for højdejustering af toilettet. Cisternen bruges sammen med Bano drejbart toilet. Cisternen kan højdejusteres 200 mm ved hjælp af den elektriske motor. Den elektriske hæve/sænke-funktion betjenes enkelt fra et integreret panel som er i begge toilettets støttehåndtag.



Materialspecifikation

Hovedramme: Korrosionsbehandlet stål, EL galvaniseret
Afskærmningsdæksel: ABS/ PMMA plast i farvekode RAL 9016 (standard).

Teknisk information

Strømforsyning: U In: 230V AC/50Hz, I In: max. 3,9A, U Out: 24V DC, max. 120 VA IPX6

Tilslutning af strøm: Vægmonteret koblingsboks min IP44.

OBS. placeringen af koblingsboks skal placeres udenfor EL-område 2. Tilslutningen udføres af en elektriker.

Tilkobling vand: 1/2" Tilkobling udføres af VVS fagkyndig person.

Maks vægt statisk belastning støttehåndtag: 250kg

Maks vægt statisk belastning toilet: 500kg

Maks vægt ved højdejustering: 300kg (Reduceret hastighed må forventes).

Løftehastighed: 12mm/s

Vandmængde cisterne: 3/6 liter justerbar til 4,5/7 liter

Fejlmelding: Hvis cisternens elektriske højdejusteringsfunktion ikke virker, skal cisternens nulstillings funktion aktiveres. Hold betjeningspanelets knap for 'ned' inde i 10 sekunder. Cisternen vil derpå begynde at gå ned som en del af dens reset funktion. Når cisternen er i laveste position er cisternens styringsystem nulstillet og vil nu fungere som normalt. Hvis ovenstående fremgangsmåde ikke virker, bedes du kontakte din nærmeste Bano afdeling for vejledning og assistance.

Rengøring og vedligehold

Der kan bruges almindeligt mildt rengøringsmiddel til rengøring. Brug en blød klud eller svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Skyl med vand og tør af med en fugtig klud. Rengøringsmidler som indeholder alkohol og bruges i lægemiddelindustrien, er OK. Andet vedligehold af bevægelige del er ikke nødvendig, men Bano anbefaler regelmæssig brug af højdejusteringen.

Advarsel

Brug aldrig skuremidler eller rengøringsmidler som indeholder stærke kemikalier, skurepulver, klor, syrer, metanol, sprit, terpentin eller lynol.

Affaldshåndtering og genanvendelse

Produktet kan genanvendes. Elektriske komponenter kan let afmonteres og leveres til genanvendelse i overensstemmelse med myndighedskrav.

5920-BVT Bano drejbart toilet

Bano drejbart toilet



Produktinformation

Toiletsædet drejes enkelt ved hjælp af en udløsermekanisme integreret i toilettets støttehåndtag. Støttehåndtaget kan hæves og sænkes. Rygstøtten og toiletsædet kan enkelt fjernes i forbindelse med rengøring.



Materialoespecifikation

Støttehåndtag: Integralskum med polyuretanlak

Ryglæn: Integralskum med polyuretanlak

Toiletsæde: ABS/ PMMA plast

Toiletskål: Glaseret porcelæn

Vedligeholdelse støttehåndtag og ryglæn

Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør ikke anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i lægemiddelindustrien, kan bruges.

Advarsel

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og lynol skal ikke brukes.

Vedligeholdelse toiletsæde

Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør ikke anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i lægemiddelindustrien, kan bruges.

Vedligeholdelse toiletskål

Produktet er fremstillet i porcelæn og kræver minimal vedligeholdelse. Anvend en blød klud eller en svamp sammen med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du vil have en skinnende overflade, kan du anvende vinduesrens. Genstridige pletter fra hårdt eller rustholdigt vand kan ofte fjernes med pletfjerner, men sørg for at produktet skylles grundigt efter rengøring. Regelmæssig rengøring er desuden med til at beskytte produktets overflade mod vandpletter. Når tiden er moden til det, kan du friske overfladens udseende op med et poleremiddel.

Advarsel

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Du skal også undgå at hælde varmt vand eller placere meget varme genstande på overfladen. Den højeste sikre temperatur er 80°C (standardtemperaturen på varmt vand fra hanen er kun 60 °C). Hvis du bruger en elkedel, er det meget vigtigt, at du undlader at hælde varmt vand på produktet.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!